

TEST DI GRAHAM

**Test per la determinazione delle uova
di *Enterococcus vermicularis*.**

Il test di Graham è una tecnica semplice (scotch test) per la raccolta delle uova di *Enterococcus vermicularis* dai margini perianali.

Il test di Graham è un sistema per test individuale, costituito da tre vetrini pronti per l'uso, per la corretta ripetizione dell'esame per tre giorni.

Il prodotto è in accordo a : European Community Guidelines 98/97/EC & RD 1662/2000.

RACCOLTA DEL CAMPIONE

- Eseguire la raccolta del campione al mattino, prima di urinare, defecare e lavarsi.
- Staccare la striscia adesiva dal vetrino ed applicarla sui margini perianali dal lato adesivo.
- Premere delicatamente la striscia sulla zona perianale.
- Dopo la pressione ritirare la striscia ed ri-applicarla sul vetrino, sempre dalla parte adesiva, evitando di piegarla e che si formino bolle d'aria.
- Inserire il vetrino nella busta e scrivere in corrispondenza di "NOMBRE" il proprio nome e cognome e, in corrispondenza di "FECHA" la data.

CONFEZIONE
25RP1713

TEST DI GRAHAM

90 TESTS (3 X 90 VETRINI)